



**Deutsch: Gebrauchsanweisung zu Art.-Nr. 3900 –  
Pflegehand**

**Français : Instructions d'utilisation de l'art. 3900 –  
Brosse de soins**

**Italiano: Istruzioni d'uso per l'art. n. 3900 –  
Lavette multifunzione**





**Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Rheumaliga entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude.**

**Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Nous espérons qu'il vous apportera satisfaction.**

**Grazie di cuore per aver scelto un prodotto della Lega svizzera contro il reumatismo. Ci auguriamo che possa esserle di aiuto.**



Lieferumfang · Étendue de la livraison · Volume di consegna



Stiel der Pflegehand

Manche de la brosse de soins

Manico della lavette multifunzione



Eincremekissen für Salben, Lotionen und Cremes

Applicateur pour pommades, lotions et crèmes

Applicatore lavette per pomate, lozioni e creme



Pflegeschwamm

Éponge de bain

Spugna lavette



Pflegebürste

Brosse de soins

Spazzola lavette

---

Die Aufsätze sind mit einem Klettverschluss am Stiel fixiert und können durch vorsichtiges Lösen des Klettverschlusses ausgewechselt werden. Die Aufsätze können einzeln nachbestellt werden (Art.-Nr. 3900A-C).

Les accessoires se fixent au manche à l'aide d'une bande velcro. Pour remplacer un accessoire, détacher délicatement la bande velcro. Les accessoires peuvent être achetés séparément (n° d'art. A3900A-C).

Gli accessori si fissano al manico con una chiusura a velcro e possono essere sostituiti staccandoli delicatamente. Gli accessori possono essere ordinati in un secondo tempo singolarmente (n. art. 3900A-C).



**Verwendungszwecke · Exemples d'utilisation ·  
Esempi di impiego**

Erleichtert das Pflegen von Beinen und Füßen.

Facilite les soins des jambes et des pieds.

Facilita la cura di gambe e piedi.





Selbstständiges und erleichtertes Eincremen des Rückens bei eingeschränkter Schulterbeweglichkeit.

Permet d'appliquer des soins dans le dos facilement et sans aide en cas de mobilité réduite de l'épaule.

Aiuta ad applicare autonomamente la crema sulla schiena in caso di limitata mobilità delle spalle.

